









# Guide d'utilisation

	<b>Utilisation de la table</b> _____	<b>1</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Système de levage<ul style="list-style-type: none"><li>a. Monté/Descente</li><li>b. Relève buste</li><li>c. Relève jambes (options)</li></ul></li><li>2. Système chauffant (option)<ul style="list-style-type: none"><li>a. Commande</li><li>b. Fonctionnement</li></ul></li><li>3. Système son Atman (option)<ul style="list-style-type: none"><li>a. Connectivité Bluetooth</li><li>b. Fonctionnement</li></ul></li></ul>	
	<b>Instructions de sécurité</b> _____	<b>2</b>
	<b>Nettoyage et entretien</b> _____	<b>3</b>
	<b>Dépannage</b> _____	<b>4</b>
	<b>Questions fréquentes</b> _____	<b>5</b>
	<b>Garantie et assistance client</b> _____	<b>6</b>


# Systeme de levage



## Commandes

Monter de la table

Descente de la table

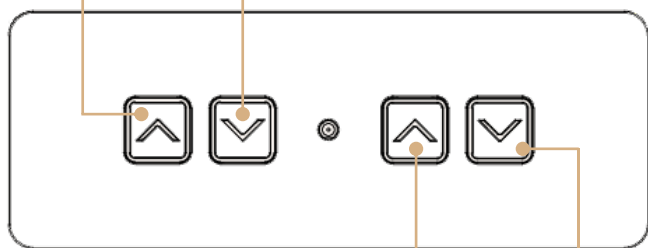

Descente du dossier

Monter du dossier

## Descriptif du produit

- Le système électrique est fourni par TIMotion, le leader sur le vérin médicalisé. Une valeur sûre au niveau de la qualité.
- Deux colonnes de vérin sont incorporées dans les pieds de la table. Ils sont dirigés par un boîtier de contrôle intelligent qui se pilote avec les commandes latérales.
- Le boîtier de contrôle sécurisé permet de synchroniser les vérins.
- Si les deux vérins se désynchronisent, le boîtier se met en sécurité et coupe le circuit pour éviter d'endommager la mécanique de la table.
- Le boîtier de contrôle se met en sécurité également lors de surtensions (Orage, inondation...Etc) pour éviter de brûler le système.
- (option) Il est possible d'incorporer une batterie dans le système afin de rendre la table autonome. La table se charge sur secteur (220 V classiques) lorsque vous débranchez, la table se lève et se descend sans avoir besoin d'être branché. Autonomie d'environ 70 à 80 levages

## Caractéristiques techniques

- Nombre maximal de boutons disponibles: 4
- Finition métallique, design rectangulaire
- Inclus une prise 3.5mm pour le chargement du TBB via le TBC
- Encastré dans le fauteuil

# Systeme chauffant



## Commandes

Augmenter la température



Affichage de la température

Diminuer la température

## Descriptif du produit

Le système chauffant permet d'accueillir les patients sur une table qui est déjà à température ambiante ou corporelle. Ce qui permet d'éviter le premier contact désagréable sur le matelas. De plus, la chaleur générée par le matelas permet d'aider à détendre les muscles.

Le système est composé de 3 tapis de chauffe (résistance carbone) de 30cmx40cm positionnés directement dans le matelas sous les mousses. La chaleur est réglable grâce à la commande de contrôle.

## Caractéristiques techniques



- Intégré dans le matelas
- Système chauffe en fibre de carbone
- 5 niveaux de chauffe
- Affichage numérique
- Nombre maximal de boutons disponibles: 2
- Affichage de 1 à 5 indiquant la température



# Systeme son Atman



## Commandes

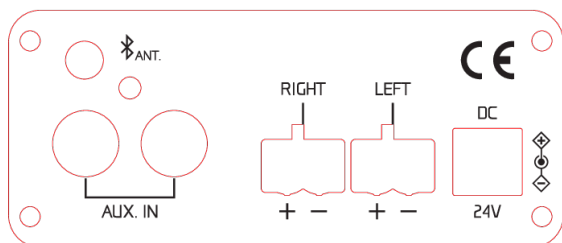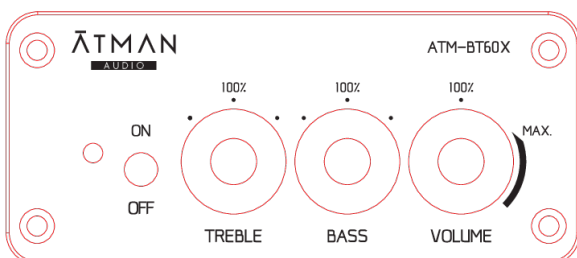

## Descriptif du produit

- Sylph est une nouvelle génération de haut-parleurs n'utilisant pas de membrane pour diffuser le son. Il s'agit d'un haut-parleur à impulsion qui transforme les surfaces comme les murs, les meubles, les terrasses... en une enceinte géante génératrice d'émotions.
- Vous pouvez effectuer les réglages directement sur l'amplificateur.

## Caractéristiques techniques

- Puissance musicale : 50W
- Impédance : 8 Ohms
- -Féquences : 40Hz à 18KHz
- -Longueur du câble audio : 1,5m (2 x 0.75mm<sup>2</sup> / copper)
- -Scotch double-face (haute résistance - 3M VHB 4941)
- -Trous de fixation (vis M5)
- -Dimensions : 10,70 x 10,70 x 4,30mm
- -Poids : 0,800 Kg
- -Matériau principal : Aluminium
- -IP37
- -CE Standard
- -Garantie 2 ans



# Instructions de sécurité

***Veillez lire et suivre attentivement toutes les instructions ci-dessous. Il est important de respecter tous les avertissements figurant dans ce guide d'utilisation.***

- Assurez-vous que la table de massage est correctement installée et stable avant de l'utiliser. Vérifiez les pieds réglables et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.
- Utilisez un revêtement de protection propre sur la table de massage pour des raisons d'hygiène et pour prolonger la durée de vie de la table.
- Vérifiez régulièrement l'état de la table de massage, y compris les coutures, et les pièces mobiles. Ne l'utilisez pas si vous remarquez des signes de dommage ou de défaut. Contactez-nous pour le service après vente.
- Assurez-vous que la personne qui reçoit le massage est confortablement installée et bien soutenue sur la table. Utilisez des coussins appropriés pour soulager la pression sur les articulations et les zones sensibles.
- Gardez les accessoires et les objets inutiles loin de la table de massage pour éviter les accidents ou les blessures.
- Ne laissez jamais la personne sur la table de massage sans surveillance.
- Utilisez les techniques appropriées de levage et de positionnement pour éviter de vous blesser lorsque vous ajustez la hauteur ou la position de la table.
- Évitez d'appliquer une pression excessive ou de forcer les mouvements sur la table de massage. Respectez les limites et les besoins de la personne qui reçoit le massage.
- En cas d'inconfort, de douleur ou de réaction indésirable pendant ou après l'utilisation de la table de massage, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de la santé.



# Nettoyage et entretien



Les laques, les nettoyeurs puissants, les détergents, les solutions à base de xylène, l'acétone ou la cétone (MEK) causent des dommages immédiats et contribuent à la détérioration du matériau. L'utilisation de tels nettoyeurs est aux risques et périls du propriétaire.

## • Matériel nécessaire :

- Un chiffon doux
- Savon de marseille
- De l'eau tiède
- Un pulvérisateur

## • Étapes à suivre :

- a. Retirez les draps et la housse du matelas : Avant de commencer le nettoyage, retirez soigneusement tous les draps et la housse du matelas. Si vous utilisez une housse de protection en plastique, retirez-la également.
- b. Aspirez la poussière et les particules : Utilisez un aspirateur muni d'une brosse douce pour éliminer la poussière et les particules de la surface du matelas. Passez l'aspirateur sur toutes les zones du matelas, en insistant particulièrement sur les coins et les coutures.
- c. Préparez la solution de nettoyage : Dans un pulvérisateur, mélangez du savon de marseille avec de l'eau tiède. Assurez-vous d'utiliser un désinfectant adapté aux surfaces des matelas.
- d. Pulvérisez la solution sur le matelas : Vaporisez uniformément la solution de nettoyage sur toute la surface du matelas. Veillez à ne pas trop mouiller le matelas pour éviter une absorption excessive d'humidité.
- e. Essuyez avec un chiffon doux : Utilisez un chiffon doux pour essuyer délicatement le matelas, en éliminant les résidus de la solution de nettoyage. Assurez-vous de bien sécher toutes les zones, y compris les coutures.
- f. Laissez sécher complètement : Permettez au matelas de sécher complètement avant de remettre les draps et la housse. Vous pouvez accélérer le processus en laissant le matelas dans une pièce bien ventilée.
- g. Remettez les draps et la housse : Une fois le matelas complètement sec, remplacez les draps et la housse de protection. Assurez-vous que tout est bien ajusté.



# Dépannage

- **Étape 1 : Identification du problème**

Avant de commencer le dépannage, identifiez clairement le problème que vous rencontrez avec votre table de massage. Prenez note de tous les symptômes ou dysfonctionnements.

- **Étape 2 : Vérifications préliminaires**

Assurez-vous que votre table de massage est correctement installée et que toutes les connexions sont sécurisées. Vérifiez également s'il y a des signes évidents de dommages physiques.

- **Étape 3 : Consultation du manuel d'utilisation**

Référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre table de massage. Cherchez des sections spécifiques liées au problème que vous rencontrez. Suivez attentivement les instructions fournies dans le manuel.

- **Étape 4 : Conseils rapides de dépannage**

Si le problème semble simple, suivez nos conseils rapides de dépannage. Cela pourrait inclure des actions telles que le remplacement de piles, la réinitialisation de la télécommande, etc.

- **Étape 5 : Assistance téléphonique**

Si le problème persiste, contactez notre service après-vente par téléphone. Ayez à portée de main le numéro de modèle de votre table et décrivez en détail le problème au représentant du service client.

- **Étape 6 : Planification d'une intervention technique**

Si le problème ne peut pas être résolu à distance, notre équipe peut planifier une intervention technique. Vérifiez les détails de la garantie et suivez les étapes fournies pour organiser une réparation ou un remplacement.

- **Étape 7 : Suivi post-intervention**

Après l'intervention technique, nous vous contacterons pour confirmer que le problème a été résolu. Si vous avez des préoccupations supplémentaires, n'hésitez pas à nous en informer.

Nous espérons que ce guide vous aidera à résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre table de massage. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous assurer une expérience de massage sans souci.



# ? Questions fréquentes

- **Comment dois-je entretenir ma table de massage ?** : Pour garantir la durabilité de votre table, nettoyez régulièrement la surface avec un désinfectant doux. Évitez les liquides excessifs et assurez-vous de la ranger dans un endroit sec.
- **Quel est le poids maximal supporté par la table de massage ?** : Consultez le manuel d'utilisation pour connaître la capacité de poids spécifique à votre modèle. En général, nos tables peuvent supporter des charges allant jusqu'à 400 kg.
- **Comment régler la hauteur de ma table de massage ?** : La plupart de nos tables sont équipées de mécanismes de réglage de la hauteur. Consultez le manuel pour des instructions détaillées. Généralement, il suffit de tourner les boutons ou d'utiliser la télécommande fournie.
- **Ma télécommande ne fonctionne pas, que dois-je faire ?** : Vérifiez d'abord les piles de la télécommande. Si le problème persiste, référez-vous au manuel d'utilisation pour des instructions de dépannage. Si nécessaire, contactez notre service client.
- **Puis-je utiliser des huiles de massage sur la table ?** : Oui, la plupart de nos tables sont conçues pour résister aux huiles de massage. Cependant, assurez-vous de nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation d'huile, ce qui pourrait endommager le revêtement.
- **Quelle est la garantie de ma table de massage ?** : La durée de garantie varie selon le modèle. Consultez le certificat de garantie fourni avec votre table ou visitez notre site Web pour plus d'informations.
- **Puis-je personnaliser ma table de massage ?** : Vous avez la possibilité de personnaliser les modules selon vos besoins. Pour ce faire, nous vous invitons à prendre contact avec notre service client.
- **Que faire en cas de problème technique avec ma table ?** : Consultez notre guide de dépannage dans le manuel d'utilisation. Si le problème persiste, contactez notre service après-vente pour une assistance personnalisée.
- **Comment commander des pièces de rechange ?** : Contactez notre service client et fournissez le numéro de modèle de votre table. Nous vous guiderons sur la disponibilité des pièces de rechange et le processus de commande.
- Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service clientèle. Nous sommes là pour vous assurer une expérience exceptionnelle avec votre table de massage.





# Garantie et assistance client

- **Service client**

Notre équipe de service client est là pour vous accompagner tout au long de votre expérience avec notre table de massage. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions, vous fournir des conseils et des recommandations, et résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par e-mail ou via notre site Web. Nous nous engageons à vous offrir un service client de qualité et à vous apporter une assistance personnalisée.

- **Suivi et satisfactions des clients**

Nous attachons une grande importance à votre satisfaction envers nos produits et services. C'est pourquoi nous assurons un suivi rigoureux sur tous nos produits, afin de nous assurer de leur bon fonctionnement et de votre entière satisfaction. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous les partager. Votre avis est précieux pour nous et nous permet d'améliorer continuellement nos produits et services pour répondre à vos besoins.

- **Pièces de rechange**

Nous comprenons que certaines pièces de votre table de massage peuvent s'user ou se détériorer au fil du temps. C'est pourquoi nous proposons un service de pièces de rechange afin de prolonger la durée de vie de votre table. Si vous avez besoin de remplacer une pièce spécifique, veuillez nous contacter. Nous vous guiderons dans le processus de commande et nous assurerons que vous recevez les pièces de rechange nécessaires pour maintenir votre table en parfait état.(cf numéro de page)

Pour toute question ou assistance, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant : **+33 1 87 66 51 55**.